

	Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd.	Dokument č.: HL/CE-02-05	Verze: A/1	Strana: 1/3
	CE Technický soubor	Návod k použití	Datum vydání: 2025-05-19	



Návod k použití

【Název produktu】 Fixační lékařská náplast

【Model】 Typ A, Typ B, Typ C, Typ D

【Velikost】 30mm×60mm、33mm×60mm、30mm×74mm、33mm×74mm、24.5mm×52mm、24mm×52mm、35mm×70mm

【Struktura a složení】 Fixační lékařská náplast se skládá z podkladového materiálu potaženého lepidlem a odnímatelného papíru. Je nesterilní a určena k jednorázovému použití. Používá se na neporušenou pokožku mimo rány.

【Zamýšlené použití】 Je určena k lepení zdravotnických prostředků na konkrétní místa lidského těla.

【Návod k použití】

- 1) Před použitím zkontrolujte, zda není obal poškozen, a ujistěte se, že je použit v rámci doby použitelnosti. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.
- 2) Očistěte a dezinfikujte oblasti, které je třeba upevnit nebo chránit, a vyberte vhodnou fixační lékařskou náplast. Vyjměte produkt, odstraňte ochranný papír, přiložte náplast na příslušnou oblast a jemně přitlačte okraje náplasti prsty. U Typu B je před použitím potřeba odstranit podkladovou vrstvu.
- 3) Po použití se s náplastí nakládá jako se zdravotnickým odpadem.

【Opatření】

- 1) Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený.
- 2) Tento výrobek není sterilní a nelze jej používat opakovaně.
- 3) Během používání se nedotýkejte lepidla rukama.
- 4) Nepoužívejte na rány.
- 5) Je zakázáno používat v případě alergické reakce.

【Kontraindikace】 Osobám alergickým na složení produktu je používání zakázáno.

【Skladovací podmínky】 Výrobek musí být během přepravy chráněn před silným tlakem, přímým slunečním zářením, deštěm a sněhem. Skladujte ve větraném, suchém prostředí bez korozivních plynů.

【Doba použitelnosti】 3 roky

【Číslo šarže/ Datum výroby/ Datum expirace】 Viz štítek na obalu výrobku


 Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd. CE Technický soubor	Dokument č.: HL/CE-02-05	Verze: A/1	Strana: 2/3
	Návod k použití	Datum vydání: 2025-05-19	

【Popis symbolů】

	Varování		Datum spotřeby
	Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství/Evropské unii		Nepoužívejte opakovaně
	CE označení		Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, a přečtěte si návod k použití.
	Datum výroby		Nesterilní
	Země výrobce		Zdravotnický prostředek
	Výrobce		Číslo šarže
	Křehké		Uchovávejte v suchu
	Uchovávejte mimo sluneční záření		Tímto směrem nahoru
	Čtěte návod k použití		Teplotní omezení
	Omezení vlhkosti		Jedinečný identifikátor prostředku
	Dovozce		Distributor



Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd.
No.55 Yuejin Road, Zouqu Town, Changzhou City, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

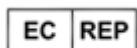

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o..
Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
Tel.: +420 273 167 580, E-mail: info@quickseal.eu

 Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd. CE Technický soubor	Dokument č.: HL/CE-02-05	Verze: A/1	Strana: 3/3
	Návod k použití	Datum vydání: 2025-05-19	

【Historie revizí】

Č.	Revize	Obsah revize	Datum vydání
1	A/0	První vydání	2021-01-20
2	A/1	1. Přidán model “Typ D” a velikost “24.5 mm × 52 mm, 24 mm × 52 mm, 35 mm × 70 mm”. 2. Upraven symbol EC REP.	2025-05-19