

Jednoduché měření hladiny glukózy v krvi doma i na cestách

rychlý • přehledný • snadno použitelný



SEJOY BG-710b


Moderní glukometr pro pohodlné měření hladiny glukózy v kapilární krvi z prstu. Pomůže Vám mít **výsledky rychle** k dispozici a lépe sledovat **každodenní hodnoty**.

- 🕒 Výsledek měření do **5 sekund**
- 📶 Bezdrátové propojení s mobilní aplikací **GlucoJoy**
- ↔️ **Automatické ukládání naměřených hodnot** do telefonu
- 📄 Paměť až **1 000 výsledků** s datem a časem
- 📊 Přehledné průměry za 7 / 14 / 28 dní
- 🔍 Testovací proužky **bez nutnosti ručního kódování**
- 💧 Kalibrace na plazmatický ekvivalent



Testovací proužek **BS-602**
50ks v 1 balení

Hrazen zdravotní pojišťovnou
(SÚKL/VZP kód **5017236**)
dostupné také pro samoplátce

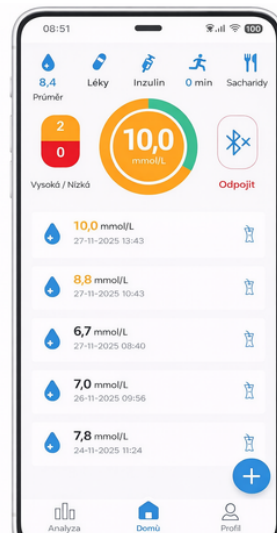

Vhodný pro domácí kontrolu i každodenní používání

Přesné a spolehlivé měření pro každý den

Glukometr SEJOY BG-710b je navržen pro snadné a pohodlné používání v **domácím prostředí**. Nabízí rychlé měření, přehledné zobrazení výsledků a jednoduché ovládání.

Kalibrace na plazmatický ekvivalent pomáhá zajistit srovnatelnost výsledků.


Rozsah měření 0,6–33,3 mmol/L je vhodný pro běžné sledování hodnot glukózy.



Glukometr SEJOY BG-710b



Testovací proužky BS-602
50ks v 1 balení

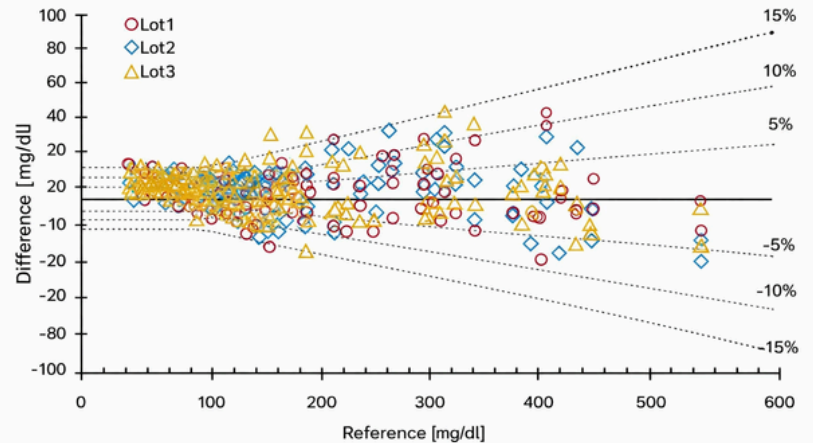

Technické specifikace

- ✓ **Metoda měření:** elektrochemická
- ✓ **Rozsah měření:** 0,5–33,3 (mmol/L)
- ✓ **Velikost vzorku:** cca 0,6 µl
- ✓ **Doba odezvy:** 5 sekund
- ✓ **Paměť:** až 1 000 výsledků
- ✓ **Napájení:** 2× AAA baterie
- ✓ **Provozní teplota:** 5–45 °C
- ✓ **Rozměry přístroje:** 94,9 x 56,5 x 22,8 mm (d x š x v)
- ✓ **Hmotnost:** cca 50 g (bez baterií)

Měření ve 4 jednoduchých krocích

Vaše výsledky vždy přehledně po ruce

1) Vložte testovací proužek do glukometru



2) Odběr kapilární krve



3) Přiložte kapku krve na testovací proužek



4) Odečtěte výsledek do 5 sekund



Aplikace je aktuálně dostupná v **angličtině** a dalších 5 světových jazycích. Pro účely tohoto letáku byly obrazovky aplikace přeloženy do češtiny.

Mobilní aplikace pro přehled Vašich výsledků

Stáhnout v Google Play

Stáhnout v App Store



GlucoJoy

S mobilní aplikací GlucoJoy můžete své naměřené hodnoty pohodlně ukládat, sledovat vývoj v čase a mít lepší přehled o svých výsledcích.

Výhody aplikace:

- ukládání výsledků měření
- přehled historie měření
- grafické zobrazení trendů
- možnost sdílení výsledků
- snadné použití v mobilním telefonu

Používání aplikace je *volitelné*.

Veškeré informace v tomto letáku mají informativní charakter. Z důvodu možných tiskových a redakčních úprav si společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o. vyhrazuje právo na změny. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Použití obrázků a textů bez předchozího souhlasu není dovoleno. Všechna práva vyhrazena.

Datum vydání 3/2026 © 2026 QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.



Informace a objednávky:
QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.
www.quickseal.eu

info@quickseal.eu
+420 273 167 580
QuickSealCzech